



BOND LIGHT CURE BONDING



DESCRIPCIÓN:

El adhesivo para cemento de fotocurado Klepp Bond Light Cure Bonding está diseñado para fijar materiales compuestos de resina a la dentina y al esmalte. La viscosidad ideal permite que el material penetre en los microtúbulos para mejorar la adhesión mecánica.

INDICACIONES DE USO:

El adhesivo para cemento de fotocurado Klepp Bond Light Cure Bonding es un adhesivo fotopolimerizable dental diseñado para fijar materiales de restauración a la dentina y al esmalte.

1.Prepare el diente. Aísle y seque el diente por completo.

2.Si utiliza el agente de grabado Klepp Etch realice el grabado del esmalte por 15 segundos, o si se aplica a la dentina, realice el grabado durante 10 segundos; nunca deje el agente de grabado sobre el diente por más de 60 segundos. Si agita suavemente el agente de grabado durante la aplicación, puede mejorar la acción.

3.Enjuague bien con agua y seque el diente por completo. La superficie grabada seca debe tener un color blanco apagado y sin brillo. Si la superficie que se grabara no lo tiene, repita el paso 2.

4.Coloque 2 gotas del adhesivo para cemento de fotocurado Klepp Bond Light Cure Bonding sobre una almohadilla de distribución u otra superficie adecuada. Empape por completo una punta de cepillo con la sustancia y aplique generosamente una capa uniforme sobre el diente preparado.

5.Con una lámpara de fotocurado (con una potencia mínima de 600mW/cm²), realice el curado del adhesivo durante 20 segundos. La superficie debe estar brillante. En caso contrario, repita los pasos 4 y 5.

6.Coloque el material de restauración para fotocurado sobre el adhesivo. Consulte las instrucciones del fabricante para la colocación, el curado y el acabado del material de restauración.

CONTRAINDICACIONES:

El adhesivo para cemento de fotocurado Klepp Bond Light Cure Bonding está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas agudas a las resinas de metacrilato.

ADVERTENCIAS:

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto enjuague de inmediato con abundante agua. Busque atención médica.

ALMACENAMIENTO:

●Las condiciones de almacenamiento recomendadas son de 2°C a 27°C, y se debe dejar el producto a temperatura ambiente antes de usarlo. (aprox 23°C)

- No congele el producto.
- Consulte la fecha de vencimiento en el envase.
- No lo exponga a temperaturas elevadas ni a luz intensa.
- Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar