

# Klepp

HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

## CORD



Tamaño	Color	Contenido
0000	(el más fino) Negro / Azul	305cm
000	(Ultra fino) Negro / Gris	305cm
00	(Extra fino) Marrón / Amarillo	305cm
0	(Fino) Violeta / Lila	305cm
1	(Medium) Azul / Celeste	305cm

### DESCRIPCIÓN Y/O ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Hilo retractor gingival. Indicado para coadyuvar en la retracción gingival antes de la toma de una impresión y de la colocación de resina de cerca del margen de la encía.

### COMPOSICIÓN:

Hilo de algodón y colorantes.

### MODO DE USO:

1. Seleccione el hilo con el diámetro adecuado.
2. Corte el hilo según la longitud requerida con el Corte Fácil del envase. Si es necesario, el hilo puede ser impregnado con Klepp solución astringente separadora gingival.
3. Coloque el hilo en el surco con ayuda de un empacador adecuado.
4. Deje el hilo aproximadamente 5 minutos en el surco.
5. Retire el hilo inmediatamente antes de la toma de impresión ó de la aplicación de la resina. Puede humedecer ligeramente el hilo para facilitar su extracción y reducir la hemorragia gingival.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para evitar un posible desplazamiento permanente de la encía, el hilo no debe permanecer más de 20 minutos en el surco.  
Tras finalizar el procedimiento, asegúrese de retirar el hilo del surco.  
Cierre la tapa luego de usar.  
Producto de un solo uso, NO REUSAR.  
NO ESTÉRIL.  
No utilizar si el envase estuviera deteriorado o con signos de conservación inadecuada.



 [www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)

 [info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)