



## DENTICID



### DESCRIPCIÓN:

Klepp Denticid es una solución desinfectante dental compuesta por Gluconato de Clorhexidina al 2%.

El producto está recomendado para la eliminación de los restos dentarios adheridos a las paredes dentinarias, para lograr una correcta adaptación del material restaurador y, en consecuencia, reducir la futura filtración marginal.

### INDICACIONES:

Klepp Denticid es una solución de gluconato de clorhexidina al 2% indicada para:

- Desinfección de conductos radiculares en endodoncia.
- Desinfección de cavidades o preparaciones en operatoria dental y prótesis.

### COMPOSICIÓN:

Gel ácido de pH de 3,3-3,6 a base del ión flúor al 1,23%

### INSTRUCCIONES DE USO:

#### Endodoncia:

- Para desinfección de canales.
- Después de haber enjuagado con agentes como hipoclorito de sodio y EDTA para eliminar los restos de pulpa, tejido necrótico o restos de dentina.
- Enjuague con abundante agua estéril.
- Aplique Klepp Denticid irrigando durante 60 segundos, como irrigación final.
- Seque cuidadosamente con aire.
- Continúe normalmente con la técnica de trabajo.

#### Operatoria / Prótesis:

- Aplique Klepp Denticid durante 60 segundos frotando con algodón, pincel o microbrush.
- Seque cuidadosamente con aire.
- No enjuague.
- Continúe normalmente con la técnica de trabajo.
- Cuando se colocan restauraciones directas o cementadas por resina, no se ha verificado reducción en la fuerza de adhesión cuando Denticid se aplica antes o después del grabado ácido.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No utilizar en canales que estén húmedos con hipoclorito de sodio porque se formará un precipitado marrón. Enjuague con agua antes de colocar KLEPP DENTICID.

No permita que se ingieran volúmenes del material. Elimine el material extraño con técnicas de vacío.

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a clorhexidina.

Mantener el producto lejos de los niños.

No utilice este producto si su envase se encontrara dañado o roto.

No utilizar en canales que estén húmedos con hipoclorito de sodio porque se formará un precipitado marrón. Enjuague con agua antes de colocar KLEPP DENTICID.

### VENCIMIENTO:

24 meses.

### ALMACENAMIENTO:

En un lugar fresco y bien cerrado. No congelar.



[www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)



[info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)