



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

DENTIN CONDITIONER



DESCRIPCIÓN:

Klepp dentin conditioner es un agente acondicionador de cavidades dentales, solución compuesta por ácido poliacrílico al 10%.

Limpia las superficies del diente optimizando la adhesión de los cementos de ionómero vítreo. Provee mayor longevidad a la restauración al mejorar el sellado marginal. Disminuye el riesgo de sensibilidad postoperatoria al dejar una pasta viscosa en los túbulos dentinarios.

INDICACIONES:

Klepp dentin conditioner.

Es una solución diluida de ácido poliacrílico destinada a remover la capa de barrillo de la superficie del diente y para acondicionar la dentina, mejorando así la unión entre el cemento de ionómero de vidrio y la dentina.

COMPOSICIÓN:

Solución de ácido poliacrílico al 10%.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agite bien el producto antes de usar.
2. Luego de la preparación del diente aplicar durante 20 segundos KLEPP DENTIN CONDITIONER a las superficies de unión utilizando una torunda de algodón o hisopo.
3. Enjuagar bien con agua. Secar tocando con una torunda de algodón o hisopo o aplicando aire suavemente con una jeringa de aire. NO secar totalmente. Los mejores resultados se obtienen cuando las superficies preparadas aparentan estar húmedas (reflectantes).
4. Aplicar ionómero de vidrio como agente de unión de base/protector de cavidades o material restaurador.
5. Tapar el frasco inmediatamente después del uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, enjuagar inmediatamente con agua.
2. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica.
3. Hipersensibilidad al ácido poliacrílico. En casos excepcionales puede ocurrir. Interrumpir el tratamiento.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Contenido neto: 10 ML

VENCIMIENTO:

24 meses.

ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura de 4-25°C en ambiente alejado de la luz.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar