



DESENSITIZER



DESCRIPCIÓN:

Solución desensibilizante de oxalato de potasio 2,6% para ser utilizada por el odontólogo para minimizar las reacciones de sensibilidad dental y proteger la pulpa dental.

INDICACIONES:

- Superficies de raíces expuestas / Raspaje y alisado de raíces.
- Antes de restauraciones directas o indirectas.
- Blanqueamiento dental.
- Restauraciones de composite.
- Coronas y puentes.
- Sensibilidad dentinaria.
- Profilaxis.

La capa de oxalato de calcio que se forma es sumamente delgada y no interfiere en la cementación posterior.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Coloque 10 gotas de desensitizer. en un hisopo.
- Aplique la solución sobre la superficie expuesta de dentina que debe permanecer mojada con solución por lo menos durante treinta segundos.
- Enjuague con agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No aplicar el producto directamente sobre el paciente.

Dosificar utilizando un hisopo de algodón.

No tragar.

No utilice éste producto si su envase se encontrara dañado o roto.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Algunos pacientes pueden sentir sensación de picazón durante la aplicación.

Si la molestia persiste, discontinue la aplicación y enjuague con abundante agua.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Goteritos de distintos contenidos: 1, 3, 5 y 10 ml.

VENCIMIENTO:

24 meses

ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco y cerrado correctamente. No refrigerar.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar