

Klepp

HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

FLÚOR 1 MINUTE



DESCRIPCIÓN:

Gel ácido de pH de 3,3-3,6 a base del ión flúor al 1,23%
Gel tixotrópico para topificaciones de flúor. El flúor aplicado sobre las piezas dentales, disminuye considerablemente el riesgo de adquirir caries dentales, ya que hace más resistente a las piezas dentales, protegiéndolas de la acción de las bacterias y los ácidos que éstas producen.
Producto de uso profesional odontológico.

INDICACIONES:

Prevención del desarrollo de las caries dentales.

COMPOSICIÓN:

Gel ácido de pH de 3,3-3,6 a base del ión flúor al 1,23%

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Realizar una completa limpieza de la boca del paciente.
2. Rellenar con el gel hasta 1/3 parte de la cubeta aplicadora.
3. Secar la superficie dentaria e insertar la o las cubetas en la boca del paciente.
4. Mantener una mordida suave por el lapso de 1 a 4 minutos (en el caso del Klepp Flúor neutro deben ser 4 minutos y en el Klepp Flúor 1 minuto entre 1-4 minutos).
5. Generar un ligero movimiento de masticación. Remover la/s cubeta/s para que el paciente pueda expectorar el exceso de gel.
6. El paciente no debe comer, tomar o enjuagarse por el transcurso de 30 minutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No ingerir.
No utilizar en material de vidrio.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
El uso prolongado puede alterar la estructura de las porcelanas.
Sin TACC.

VENCIMIENTO:

24 meses

ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco y bien cerrado. No congelar.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar