



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

FLÚOR NEUTRO



DESCRIPCIÓN:

Gel Tixotrópico para topiccaciones de Flúor.

PH NEUTRO:

2% Fluoruro de Sodio (0.9% de ion fluoruro) pH balanceado (6.5 -7.5), Gel Tixotrópico.

Ideal para pacientes con intolerancia al Flúor acidulado o al flúor ácido.

No contiene colorantes, cuatro minutos de aplicación.

Recomendado para procedimientos post-blanqueamiento.

INDICACIONES:

- Provee resistencia del esmalte dental a los ácidos producidos por las enzimas bacterianas.

- Remineralización del esmalte dental en caries iniciales. Post tratamiento de blanqueamiento.

- Desensibilización de cuellos y bases rellenas. Pacientes post irradiación.

MODO DE USO:

Realizar una completa limpieza de la boca del paciente.

Rellenar con gel hasta 1/3 parte de la cubeta aplicadora.

Secar la superficie dentaria e insertar la cubeta en la boca del paciente.

Mantener una mordida suave por el lapso de 4 minutos. Generar un ligero movimiento de masticación.

Remover la cubeta para que el paciente pueda expectorar el gel.

El paciente no debe comer, tomar o enjuagarse por el transcurso de 30 minutos.

COMPOSICIÓN:

Fluoruro de sodio 2.0% Xilitol , excipientes csp 100%.

Fórmula neutra ideal para pacientes con restauraciones cosméticas, porcelana o resina. Su balance neutro permite mejor tolerancia y aceptación por los pacientes.

Gel tixotrópico.

Fácil de aplicar.

No contiene colorantes.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.

SIN TAAC.

CONSERVACIÓN:

En lugar fresco y bien cerrado. No congelar.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar