



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

GEL/SOLUCIÓN ASTRINGENTE SEPARADOR/A GINGIVAL.



DESCRIPCIÓN:

La acción astringente del cloruro de aluminio, provoca una hemostasia local y contracción de las capas más superficiales de la encía.

Indicaciones:

Solución y gel astringente para toma de impresiones dentales.

COMPOSICIÓN:

Gel a base de Cloruro de Aluminio.

Solución a base de Cloruro de Aluminio Hexahidratado.

INSTRUCCIONES DE USO:

Separación gingival por impregnación de un hilo con Klepp Solución Astringente Separadora Gingival:

Se debe utilizar un hilo no medicamentoso (no impregnado).

- Impregnación previa: Colocar 2-4 gotas en un vaso dappen e impregnar el hilo de impregnación en la solución. Colocar el hilo así impregnado en el surco gingival.

- Impregnación in situ: Se coloca en el surco gingival y se impregna con cuidado este hilo con la solución utilizando una pipeta o algodón. Utilizar 1-2 gotas.

En ambos casos dejar colocado durante 3-5 minutos y luego retirar el hilo teniendo mucho cuidado de no dejar ningún fragmento de hilo en el surco. Enjuagar con agua abundantemente.

En caso de supuraciones y hemorragias gingivales leves colocar utilizando una torunda de algodón una o dos gotas sobre la encía. Esperar 1-2 minutos y enjuagar cuidadosamente la zona.

Separación gingival con el uso de Klepp Gel Astringente Separador Gingival:

- Retirar la tapa de la jeringa y colocar una punta aplicadora.
- Aplicar una cantidad suficiente de gel directamente en el surco, contorneando la periferia del diente preparado.
- Si la situación clínica lo requiere, introducir un hilo de retracción en el surco gingivodental.
- Dejar actuar aproximadamente 2 minutos.
- Si el sangrado persiste, enjuagar, aplicar de nuevo el gel y esperar unos 2 minutos.
- Enjuagar y secar con la jeringa triple.
- Tomar las impresiones.
- Descartar la punta aplicadora.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

No utilice este producto si su envase se encontrara dañado o roto.

Irritante para los ojos.

Inflamable.

Colocar solamente la cantidad de gotas aconsejadas para el efecto deseado. No colocar mayor cantidad.

Dejar en contacto con la mucosa solo el tiempo indicado. No dejar más tiempo.

Enjuagar bien, con abundante agua. No dejar depósitos de sal de aluminio que provocan irritación.

No ingerir.

No utilizar hilos medicamentosos (impregnados ya que pueden producirse reacciones de incompatibilidad).

No reutilizar la punta aplicadora.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al aluminio o antecedentes de hipersensibilidad.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Solución de cloruro de aluminio hexahidratado 25% P/V: 17 ml.

Gel de cloruro de aluminio 25% P/V: 17 ml.

VENCIMIENTO:

24 meses

ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco, al abrigo de la luz y cerrado correctamente.



www.klepp.com.ar

info@klepp.com.ar