



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

CEMENTO DE GROSSMAN ENDODÓNTICO



DESCRIPCIÓN:

Cemento obturador de canales radiculares. Polvo para obturación definitiva de los canales en endodoncia, con la colocación de conos.

INDICACIONES:

Obturación definitiva de los canales de endodoncia con la colocación de conos.

COMPOSICIÓN:

Klepp Cemento de Grossman endodóntico. Óxido de cinc 42%, Resina 27%, Subcarbonato de bismuto 15%, Sulfato de bario 15%, Borato de sodio 1%

INSTRUCCIONES DE USO:

El diente debe estar perfectamente aislado. Luego de la preparación cuidadosa del canal, de la desinfección por irrigación con una solución antiséptica, seguida de enjuague y secado con puntas de papel, preparar extemporáneamente la pasta incorporando en forma progresiva el polvo al Eugenol hasta obtener una pasta homogénea. Utilizar una loseta de vidrio pulido. Dividir el polvo en dos, mezclarlo con el líquido y agregar el resto del polvo. Mezclar hasta consistencia homogénea, sin gránulos, con buen corrimiento y formación de un hilo desde la loseta con la espátula. Inmediatamente rellenar el canal e insertar en la pasta uno o varios conos previamente adaptados y/o mediante la técnica de condensación lateral. Verificar el relleno correcto de los canales con un control radiológico.

PRECAUCIONES:

Como para todo producto de obturación canal, sólo se debe obturar un canal perfectamente liso, limpio y desinfectado. · La pieza dentaria a tratar debe estar previamente aislada (con aislamiento absoluto). · No utilizar asociado a los materiales compuestos / resinas, debido a que las preparaciones a base de Eugenol inhiben la polimerización de estos últimos. · Controlar la longitud de los canales antes de la obturación con el fin de evitar la excedencia apical, debido a que la pasta obtenida no es reabsorbible. · Manipular el producto con instrumental esterilizado (limas). · Puede provocar sensibilización en contacto con la piel · Posibilidad de efectos irreversibles. · En caso de contacto accidental, enjuagar con abundante agua. · Utilizar guantes y protectores oculares. · Agitar el frasco antes de su uso, para despegarlo de las paredes del mismo. El producto tiende a compactarse. · Mantener este producto alejado del alcance de los niños · Este producto no debe ser utilizado en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula. · Tapar inmediatamente luego de su uso · No usar una vez vencido.

CONTRAINDICACIONES:

Este producto no debe ser utilizado en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente entre 10-24° C. Alejado del calor y / o luz solar directa.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar