



INSTRUMENTS



DESCRIPCIÓN:

Solución limpiadora y desinfectante biodegradable concentrada, con acción bacteriostática y bactericida de amplio espectro y fungicida.

INDICACIONES:

Desinfectante de instrumental médico / odontológico.
Solución bacteriostática, bactericida y fungicida. Para ser utilizada, como paso previo a la esterilización, en superficies, instrumental no poroso y accesorios metálicos y plásticos del consultorio dental y médico.
De uso en lavado manual o en lavadoras ultrasónicas.

COMPOSICIÓN:

Solución a base de Cloruro de Benzalconio al 95% y Alcohol isopropílico.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dilución de uso: (dos posibilidades).

1-Colocar 20 ml de Klepp instruments por cada litro de agua. Tiempo de contacto: 20 min.

2-Colocar 30 ml de Klepp instruments por cada litro de agua. Tiempo de contacto 10 min.

Utilizar durante las 2 hs de preparada.

Lavado por ultrasonido:

Colocar suficiente cantidad de la solución de Klepp instruments preparada en la lavadora como para permitir que todas las piezas queden cubiertas por la solución de Klepp instruments. Sumergir el instrumental previamente enjuagado con agua y prender la lavadora durante el tiempo de contacto de la dilución elegida (20 / 10 min). Retirar el material y enjuagar con abundante agua, luego esterilizar el material como de costumbre.

Lavado manual:

Se debe lavar el instrumental con cepillo y agua previo a colocarlo en la solución de Klepp instruments. Colocar la solución de Klepp instruments preparada en un recipiente adecuado donde puedan colocarse todas las piezas y queden cubiertas por la solución de Klepp instruments. Sumergir el instrumental durante el tiempo de contacto de la dilución elegida (20 / 10 min). Retirar el material y enjuagar con abundante agua, luego esterilizar el material como de costumbre.

SOBRE SUPERFICIES:

Aplicar con un paño húmedo dejándolo actuar durante el tiempo de contacto de la dilución elegida (20 / 10 min). Luego secar con una toalla de papel limpia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- ¡CUIDADO! Irritante para los ojos, piel y mucosas.
- No mezclar con otros productos.
- Usar guantes, protectores oculares y máscara para su aplicación.
- Tóxico. No ingerir.
- No aplicar sobre personas, alimentos y animales.
- Conserve fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Mantener el producto en su envase original. No reutilizar los envases.
- En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con abundante agua

durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico, llevando el envase o rótulo del producto.

• En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Beber abundante cantidad de leche, clara de huevo o agua. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o rótulo del producto.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Contenido neto: 5000ml, 1000ml, 500ml, 200 ml y 50ml.

VENCIMIENTO:

24 meses

ALMACENAMIENTO:

Conservar en envase original o en envases de plástico o vidrio. Evitar la exposición a altas temperaturas.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar