



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

KLEPPALGIN CHROMATIC




DESCRIPCIÓN Y/O ACCIÓN TERAPÉUTICA

Alginato cromático para toma de impresión dental. Sabor: Menta.

COMPOSICIÓN

Alginato y saborizante.

MODO DE USO

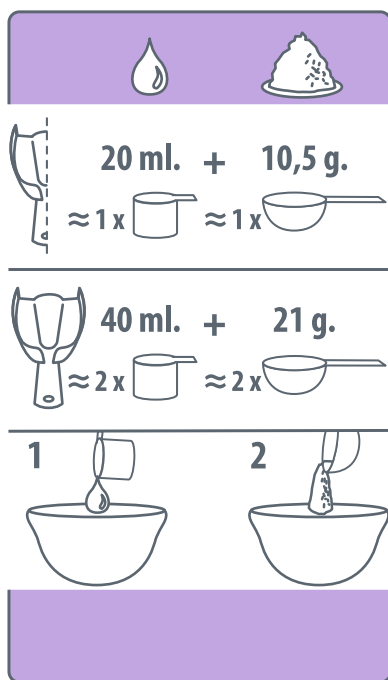

Tipo I: fraguado rápido- Tipo II: fraguado normal


No requiere un tratamiento especial antes de ser utilizado.

Material libre de polvo: proceder con precaución al abrir el sobre y extraer el polvo. Si bien puede utilizarse agua corriente, los tiempos declarados se han medido mezclando el polvo con agua desionizada a 23°C. **Mezclar enérgicamente el polvo con el agua.** Si se utilizan mezcladoras mecánicas específicas de materiales para impresiones, atenerse a las instrucciones del fabricante.

Para El alginato cromático: Manipular tal como indican las fases cromáticas que aseguran la mezcla perfecta del producto y el momento oportuno para su inserción en boca. El color violeta indica el tiempo de mezcla con una espátula, el color lila indica el tiempo disponible para cargar la cubeta de impresión, el color verde indica el momento de inserción en boca.

ADVERTENCIAS:

Las variaciones de temperatura o de dureza del agua, de velocidad o fricción aplicadas durante el proceso de mezclado provocan pequeños cambios en el tiempo de trabajo y de fraguado inicial, que son indicados automáticamente por el cambio de color. Lavar, aclarar, sacudir la impresión y vaciar el modelo.

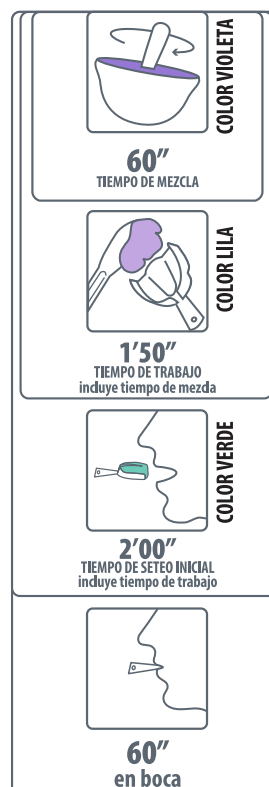

Valores obtenidos a 23 °C
con agua desionizada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las variaciones de temperatura o de dureza del agua, de velocidad o fricción aplicadas durante el proceso de mezclado provocan pequeños cambios en el tiempo de trabajo y de fraguado inicial, que son indicados automáticamente por el cambio de color.

Lavar, aclarar, sacudir la impresión y vaciar el modelo.

El modelo puede vaciarse en un plazo de hasta 168 horas con excelentes resultados. La impresión debe conservarse en una bolsa de plástico sellada sin otros agregados.

No dejar la impresión al aire ni sumergida en agua.



www.klepp.com.ar

info@klepp.com.ar