



## KLEPP METHASONA Y EUGENOL



### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Kit: KLEPP METHASONA / KLEPP ENDOCORT + KLEPP EUGENOL

- KLEPP METHASONA / KLEPP ENDOCORT: 10, 15, 20, 30g. Contenidos variables
- KLEPP EUGENOL: 7, 7.5, 10 ml. Contenidos variables.

### VENCIMIENTO:

24 meses.

### DESCRIPCIÓN:

Polvo para obturación definitiva de los canales en endodoncia, con la colocación de conos.

### INDICACIONES:

Obturación definitiva de los canales de endodoncia con la colocación de conos.

### COMPOSICIÓN:

El Klepp Methasona es un polvo a base de Óxido de Zinc y Yodoformo.  
El Klepp Eugenol es un líquido a base de eugenol puro al 100%.

### INSTRUCCIONES DE USO:

El diente debe estar perfectamente aislado.

Luego de la preparación cuidadosa del canal, de la desinfección por irrigación con una solución antiséptica, seguida de enjuague y secado con puntas de papel, preparar extemporáneamente la pasta incorporando en forma progresiva el polvo al Eugenol hasta obtener una pasta de consistencia de vaselina.

Agite el polvo para asegurar una densidad uniforme del contenido.

Se aconseja mezclar 7 partes de polvo con 1 parte de líquido durante 40 segundos. Hasta que quede una pasta homogénea.

Inmediatamente rellenar el canal e insertar en la pasta uno o varios conos previamente adaptados.

Verificar el relleno correcto de los canales con un control radiológico.

Seguidamente completar con la técnica estándar de obturación del canal.

### ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente entre 10-24° C. Alejado del calor y / o luz solar directa.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

• Como para todo producto de obturación del conducto radicular, sólo se debe obturar un canal perfectamente liso, limpio y desinfectado.

• No utilizar asociado a los materiales composites, debido a que las preparaciones a base de Eugenol inhiben la polimerización de estos últimos.

• Controlar la longitud de los canales antes de la obturación con el fin de evitar la excedencia apical, debido a que la pasta obtenida no es reabsorbible.

• Puede provocar sensibilización en contacto con la piel.

• Posibilidad de efectos irreversibles.

• En caso de contacto accidental, enjuagar abundantemente con agua.

• Utilizar indumentaria protectora y guantes adecuados.

• Agitar el frasco antes de su uso, para despegarlo de las paredes del mismo.

• Mantener este producto alejado del alcance de los niños.

• Este producto no debe ser utilizado en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

• Tapar inmediatamente luego de su uso.



 [www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)

 [info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)