



MAISTO



DESCRIPCIÓN:

Biomaterial de segunda generación para obturación de conductos radiculares de piezas dentales en estado plástico, que se adapta a las anfractuosidades del conducto radicular de piezas dentales y endurece por trabajo. Posee adecuada radiopacidad y presencia permanente en el conducto, además de una serie de propiedades reológicas básicas: compresibilidad, plasticidad, fluidez, viscosidad cinemática, viscosidad de compresión y endurecimiento por trabajo.

Neutraliza en forma sostenida y prolongada, la acción de la microflora endodóntica bacteriana remanente. Actúa positivamente en el mecanismo de reparación apical. Impide la penetración de fluido intersticial en el interior del conducto. Se reabsorbe lentamente en la zona periapical, con una velocidad similar a la que emplea el organismo para formar tejido calcificado u osteocemento, con el que sella biológicamente el extremo apical del diente.

INDICACIONES:

Tratamiento de piezas dentales permanentes y temporarias, con pulpa vital y necrosis con y sin complicación periapical.

Especialmente indicada cuando se utiliza la técnica endodóntica mínimamente invasiva intralesional.

En dientes permanentes jóvenes y adultos la obturación debe complementarse con conos de gutapercha y técnicas de compactación lateral y/o vertical. En dientes temporarios este material se usa perfectamente compactado sin conos de gutapercha.

Composición:

Pasta a base de Yodoformo y Óxido de Zinc.

INSTRUCCIONES DE USO:

Coloque una porción de aproximadamente 1 g de pasta en la loseta. Amasar con espátula de acero inoxidable, enérgicamente para que aflore el clorofenol (se pone la superficie brillante) y tenga la consistencia adecuada. Si la pasta estuviera muy seca se puede agregar clorofenol alcanforado pero en muy pequeña cantidad, (menos de una gota) si no pierde la plasticidad necesaria para compactarla.

Llévese el material con un instrumento de mano hasta 3 o 4 mm antes del límite ideal de trabajo. Deposite el material de obturación girando el instrumento en sentido antihorario, compactándolo contra las paredes y presionando hacia apical, para lograr un tapón apical de aproximadamente 2 mm de espesor en el límite de trabajo. El material endurece por trabajo a la temperatura corporal. Se comprueba la compactación del tapón apical mediante la presión con lima tipo K #15.

Para realizar una sobreobtención intralesional, con el fin de estimular el descombro y reparación de la zona apical: luego de compactado el material hasta el límite ideal de trabajo y mediante una lima pasante tipo K de pequeño calibre, se empuja el material hacia la zona periapical, regulándose con dicha acción la cantidad de material que sobrepasa el foramen.

Se completa la obturación colocando conos por condensación lateral, Thermafill o gutapercha plastificada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Es preciso advertir a los pacientes que 24 o 48 horas después del tratamiento es de esperar, en los casos de sobreobtenciones, un aumento de la sensibilidad del diente, debido al estímulo de la respuesta reparativa.

CONTRAINDICACIONES:

No debe emplearse en pacientes con sensibilidad conocida a algunos de los componentes de la fórmula.

No se aconseja su uso en la semana anterior a la realización de gammagrafía con yodo, para el diagnóstico de la función tiroidea.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Contenido neto: 20 gr

VENCIMIENTO:

24 meses.

ALMACENAMIENTO:

En su envase original bien cerrado, al abrigo de la luz y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 25°C.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar