



POWER BLEACH BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL



NOMBRE DEL PRODUCTO:
Klepp Power Bleach Profesional.

DESCRIPCIÓN:
Sistema de Blanqueamiento Dental.
Gel blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno.

INDICACIONES:
-Uso exclusivo en el consultorio dental.
-Aplicación exclusivamente por el odontólogo para aclarar uno o más dientes.
-Para dientes desvitalizados, incluidos los dientes con tratamiento endodóntico.

COMPOSICIÓN:
Klepp Power Bleach Profesional: con Peróxido de Hidrógeno al 35%
Contiene un gel blanqueador y un activador con una jeringa doble (cartucho) de auto mezcla 4:1, este sistema permite administrar la dosis precisa del activador en cada aplicación. El contenido de peróxido de hidrógeno en el gel preparado asciende al 35%.

Además, Contiene Fluoruro de Sodio y Nitrato de Potasio, sustancias capaces de reducir la susceptibilidad a caries y disminuir la sensibilidad. Es de color rojo para que pueda ser visualizado durante todo el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:
Pasos Previos:
1) Valorar el color del diente mediante comparación con la escala de colores Vita® o similar
2) Para hacer la valoración, por favor reacomode la guía de colores Vita® del siguiente modo:
Valores clasificados por tono de color:
A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Clasificados por brillo:
B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4
B2 hasta B1 = aumento de valor en 2
A3 hasta A2 = aumento de valor en 4
3) Limpiar los dientes del paciente con jet de bicarbonato KLEPP Prophy Powder o pasta de limpieza KLEPP Prophy Paste.
4) Colocar un abrebocas de mejilla o labios, o un dispositivo similar. CUIDESE LA PROTECCIÓN DE LA ENCÍA (por ejemplo, usando KLEPP Gingival Dam o colocando un dique de goma). No anestesiarse al paciente.

APLICACIÓN:
1) En primer lugar, retirar la pinza de seguridad y después la tapa. Colocar la punta de mezcla.
2) Presionar el gel para que salga de la jeringa hasta que de la punta de mezcla surja una masa de color uniforme y consistencia gelatinosa.
3) Desechar la masa inicial no homogénea.
4) El gel se debe aplicar con un espesor de aproximadamente 1 - 2 mm sobre las superficies labiales de los dientes a blanquear. La punta mezcladora resulta muy adecuada para la aplicación uniforme mediante pasada.
5) Tras unos 10 min de tiempo de actuación aspire el gel y retire los restos frotando. Si no ha blanqueado suficientemente, puede repetir el procedimiento 2 veces hasta conseguir el efecto deseado. Antes, garantizar que la protección gingival todavía sea suficiente.
6) Después volver a determinar el color dental.
7) Tras el último blanqueado aspirar primero el gel, retirar los restos frotando y después aclarar con abundante agua.
8) Dejar secar la superficie dental y pulir con pasta. A continuación, puede, opcionalmente, realizar una remineralización con Klepp Flúor Neutro o con una solución con Fluoruro. También es adecuado como tratamiento analgésico cuando hay sensibilización.
9) Si todavía hay bastante material para realizar otro tratamiento de blanqueado, extraiga la punta de mezcla, y vuelva a poner la tapa de cierre.
10) Guardar el material en heladera. Si vuelve a utilizarlo use una punta de mezcla nueva.

Dientes desvitalizados - con tratamiento endodóntico:

El gel se aplica con un acceso lingual adicional.
1) En primer lugar, se comprueba la altura del reborde alveolar. Después se extrae todo el material de relleno de la cámara pulpar.
2) Aplicar un relleno de ionómero de vidrio de 1 a 2 mm de grosor en el reborde alveolar o coronal en el suelo pulpar.
3) Aplicar la protección gingival tanto en la zona labial como la lingual del diente.
4) El gel blanqueador se aplica sobre la superficie labial, tal como se describe y adicionalmente en el orificio de acceso y se deja actuar 10 min.
5) A continuación, aspirar con cuidado el gel y aclarar con agua. Aquí también puede repetir el procedimiento 2 veces si no ha conseguido el efecto blanqueador deseado.
6) Tras concluir, aspirar con cuidado el gel y lavar a fondo con agua. Extraer cuidadosamente la protección gingival.
7) Cerrar el acceso con un material de relleno provisional que no contenga Eugenol. Esperar 2 semanas antes de colocar la restauración definitiva.

PRECAUCIONES:
Klepp Power Bleach Profesional
-LOS COMPONENTES INDIVIDUALES (GEL Y ACTIVADOR) ASÍ COMO EL GEL BLANQUEADOR YA MEZCLADO IRRITAN LA PIEL Y LAS MUCOSAS Y OCASIONAN -GRAVES DAÑOS OCULARES.
-USAR GUANTES Y PRENDAS PROTECTORAS.
-USAR GAFAS O MÁSCARA DE PROTECCIÓN TANTO PARA EL PROFESIONAL, COMO PARA PACIENTE Y ASISTENTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lavar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva. Seguir enjuagando. Consultar inmediatamente a un médico.

CONTRAINDICACIONES:
No se debe blanquear si hay:
-Patologías gingivales o enfermedades periodontales.
-Hipersensibilidad dentinaria.
-Deficientes restauraciones.
-Dientes con fisuras profundas y/o Morfología dental anómala.
-Dientes con pérdida importante de esmalte y/o defectos de desarrollo del esmalte.
-Reabsorción radicular. -Pigmentación provocada por corrosión de amalgamas (sólo saldrán quitándose con una fresa). - Composites mal ajustados.
-Dientes con grandes restauraciones u obturaciones repetidas en el mismo diente.
-Tetraciclina grado III y fluorosis moderada y grave.

ADVERTENCIAS:
-Las coronas de porcelana, carillas y empastes blancos no se aclaran con el blanqueamiento.
-Las restauraciones deberían ser selladas adecuadamente y toda la dentina expuesta sensible debería protegerse.
-Algunos pacientes han notado una incomodidad temporal en las encías, labios, garganta o lengua. Si alguno de estos síntomas persiste más de 2 días, o si empeoran progresivamente, llame a su dentista. Usualmente, estos efectos colaterales se calman de 1-3 días después de dejar el tratamiento.
-Si el paciente tiene alergia conocida o una sensibilidad química a los peróxidos, carbopol, glicerina, NO utilice Klepp Whitening. El sabor menta puede ser irritante para algunos pacientes. Si el paciente tiene una sensibilidad conocida a la menta, utilice la presentación sin sabor. -Algunas amalgamas viejas, o empastes "plateados" pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento. Esto es normal.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Power Bleach Profesional.

ALMACENAMIENTO: Luego de su uso cerrar las jeringas bien y conservar preferentemente entre 4° y 15° C (heladera preferiblemente)



www.klepp.com.ar

info@klepp.com.ar