

# Klepp

HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

## PROPHY PASTE



### DESCRIPCIÓN:

Producto de uso odontológico para la eliminación de placa bacteriana o para el pulido final de las restauraciones.

### CONDICIÓN DE VENTA:

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Producto de uso odontológico, pasta abrasiva para profilaxis y eliminación de cálculo dental. No contiene oxidantes. Las micropartículas no dañan el esmalte.

### INDICACIONES:

Eliminación de las coloraciones debidas a alimentos, tabaco, etc.

Pulido final en eliminación del cálculo dental.

Pulido fino en obturaciones.

Remoción de placa y decoloración.

Eliminación de superficies rugosas.

### COMPOSICIÓN:

Pasta a base de sílice precipitada.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Extraer con ayuda de una espátula la cantidad de Klepp Propy Paste a utilizar y colocarla sobre el cepillo o copa circular. Realice la tarea de profilaxis, de acuerdo al procedimiento estándar indicado para cada caso (remoción de placa, eliminación de coloraciones en las piezas dentarias, eliminación de cálculo dental, pulido, etc.).

### ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y cerrado correctamente.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Para uso odontológico.

No para uso interno.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Producto sin TACC.

Actúa por abrasión mecánica.

No contiene oxidantes.

Permite terminar la eliminación de cálculo después del uso de curetas o ultrasonidos sin atacar el esmalte dental.

### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Sabor: Menta o Tutti Frutti.

Contenido neto: 80 gr.

### VENCIMIENTO:

36 meses.



 [www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)

 [info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)