



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

## KLEPP PROVI-CEM NE Cemento temporal sin eugenol



### DESCRIPCIÓN:

KLEPP PROVI-CEM NE es un cemento provisorio que no contiene eugenol. Está diseñado para la cementación provisorio de coronas, puentes, incrustaciones y recubrimientos. Ofrece una fuerte adhesión al diente y al mismo tiempo, permite quitar la restauración provisorio con facilidad.

Tiempo de trabajo y de fraguado:

- El tiempo de trabajo es de 2:00 minutos.
- El tiempo de fraguado es de 4:00 a 5:00 minutos.

### INDICACIONES:

Cementación provisorio de coronas, puentes, incrustaciones y recubrimientos.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Introduzca el émbolo en el extremo posterior del cartucho.
2. Quite la tapa del cartucho girándola a 90° en sentido antihorario y deséchela.
3. Cuando utilice un cartucho por primera vez, expulse una pequeña cantidad de material y deséchelo. Sea precavido y evite contaminar los orificios.
4. Coloque una punta de mezcla nueva alineando los vástagos internos de la tapa con los del cartucho. Gire la punta de mezcla a 90° en sentido horario para trabajarla. El material ya está listo para administrarse directamente sin necesidad de mezclarlo de forma manual.
5. Limpie, enjuague y seque el lugar donde se aplicará el producto. Aplique la cantidad de cemento mezclado que desea sobre las superficies internas de la restauración provisorio.
6. Introduzca la restauración provisorio en un lapso de 2:00 minutos, y colóquela en el diente preparado y seco presionando ligeramente.
7. El curado del material en la boca demora aproximadamente de 4 a 5 minutos o menos, y una vez finalizado, debe quitarse el exceso de cemento no endurecido con un trozo de algodón húmedo u otro instrumento. El exceso de material entre los dientes se elimina con hilo dental.
8. Deje siempre la punta de mezcla colocada en su lugar después de usarla, ya que servirá de tapa del cartucho.

### PRECAUCIONES GENERALES:

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones sanitarias. Revise las Instrucciones de uso antes de Iniciar el tratamiento y utilice el producto según las indicaciones únicamente.

### ADVERTENCIAS:

Contiene componentes que pueden irritar la piel y los ojos.

### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Se encuentra disponible en cartuchos de 7 g.

### ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda su refrigeración. Almacene el material entre 2°C y 27°C.
- Déjelo a temperatura ambiente antes de su uso (aprox 23°C)
- No congele el producto.
- Consulte la fecha de vencimiento en el envase.
- No lo exponga a temperaturas elevadas ni a luz intensa.
- Mantenga los envases cerrados cuando no los utilice.



 [www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)

 [info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)