

# Klepp

HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

## HYPERSENSITIVE



### DESCRIPCIÓN Y/O ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Klepp Hypersensitive es un gel desensibilizante adherente y viscoso. Posee liberación sostenida de 5% de Nitrato de Potasio y 0,25% de Fluoruro de Sodio.

Forma una película sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y de otras zonas donde la sensibilidad post-operatoria es probable.

### COMPOSICIÓN:

Nitrato de Potasio 5%, Fluoruro de Sodio 0,25%, excipientes csp. 100%

Indicaciones:

Tratamiento de dientes con sensibilidad moderada a alta a cambios térmicos, alimentos, sensibilidad después de tratamiento periodontal, exposición de cuellos y raíces y en el tratamiento de sensibilidad que puede ser causada por el blanqueamiento dental.

### MODO DE USO:

El producto debe estar a temperatura ambiente. Si lo conservó en la heladera esperar 10- 20 minutos a que alcance la temperatura ambiente

Tópico:

- 1.Después de la profilaxis, aplique el Klepp Hypersensitive uniformemente sobre los dientes y espere 10 minutos como mínimo.
- 2.Pasado el tiempo de aplicación, retire el gel de los dientes con algodón y agua en abundancia. Evite que el paciente se trague el gel.
- 3.Repita la aplicación del Klepp Hypersensitive de acuerdo a la necesidad o en caso de aclaramientos dentales, acompañando el tiempo del tratamiento. El número de aplicaciones no debe exceder una vez al día.

En el caso del uso para prevenir la sensibilidad durante el aclaramiento dental de consultorio, lo ideal es que se realice la aplicación del Klepp Hypersensitive antes de la aplicación del gel blanqueador (Klepp Whitening).

Cubeta

- 1.Fabrique una cubeta según las necesidades del paciente. Si el paciente ya tiene una cubeta de blanqueamiento a medida, Klepp Hypersensitive puede aplicarse en esa misma cubeta.
- 2.Coloque gel en la cubeta.
- 3.Coloque la cubeta en la boca.
- 4.Presione suavemente para hacer salir el exceso de gel.
- 5.Limpie con el cepillo de dientes o con un dedo limpio.
- 6.Los tiempos de tratamiento recomendados oscilan de 15 minutos a 1 hora.
- 7.Retirar la cubeta, cepillar suavemente y enjuagar sus dientes con agua para remover todo el gel remanente.
- 8.NO TRAGUE la solución durante el enjuague.
- 9.Limpie la cubeta y guárdela en el estuche. Debería utilizarse gel nuevo en cada aplicación.

10.No comer con la cubeta colocada.

11.La boca debe estar limpia al colocar la cubeta.

### PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este producto NO es para uso nocturno
- No fumar ni comer con el producto colocado
- En caso de reacciones adversas discontinuar el tratamiento y consultar con su odontólogo
- Mantenga lejos del calor / luz solar en todo momento. Klepp Hypersensitive debe almacenarse a temperatura ambiente.
- Los pacientes no deben tragar grandes cantidades de Klepp Hypersensitive. Los excesos de producto derivados de la inserción de la cubeta y los residuos remanentes luego de su remoción deben ser cepillados y enjuagados: NO LOS TRAGUE.
- No utilizar si el envase se encontrara dañado.
- El producto NO es para inyectar.
- No aplique el producto sobre una encía en mal estado de salud.
- No utilice en pacientes con anemia y/o cualquier sensibilidad a los componentes del producto.
- Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.



 [www.klepp.com.ar](http://www.klepp.com.ar)

 [info@klepp.com.ar](mailto:info@klepp.com.ar)