



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

SILANO



DESCRIPCIÓN:

Primer de unión entre resinas orgánicas y porcelanas.

El silano es un material monocomponente que se utiliza para promover la adhesión entre resinas orgánicas y porcelana.

Para obtener los resultados deseados antes de colocar el silano, la superficie de porcelana a ser adherida o reparada deberá estar grabada con Klepp Porcelain Etch, y deberá estar completamente seca y libre de humedad residual.

Si se siguen las precauciones adecuadas, la porcelana puede grabarse intraoralmente en forma segura para efectuar la adhesión.

Klepp Silano debe ser utilizado en combinación con Klepp Porcelain Etch. Procedimiento:

Luego de haber colocado el Klepp Porcelain Etch; proceda a aplicar con un pincel Klepp Silano sobre la superficie a tratar, séquelo cuidadosamente con un chorro de aire comprimido libre de agua y aceite.

PRECAUCIONES:

- El operador, asistente y el paciente deben utilizar gafas de protección.
- Utilizar guantes y anteojos protectores, para evitar el contacto con mucosas, ojos y piel.
- Sólo para uso profesional
- Revise las instrucciones, precauciones antes de comenzar el tratamiento.
- Utilice sólo como se indica.
- Evite la exposición de la piel a las resinas.
- Confirme que el paciente no tenga alergias conocidas a los materiales del tratamiento.
- Aísle los químicos fuertes del área de trabajo.
- Mantenga siempre los productos alejados del calor y de la luz solar.
- Conserve el envase bien cerrado.
- Uso exclusivo a profesionales de la salud e instituciones sanitarias.

CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15-30°C alejado de la luz y el calor.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar