

SILICONAS DE ADICIÓN



NOMBRE DEL PRODUCTO:

Klepp Exact@

Variedades:

- Exact@, silicona de adición putty soft normal setting (2 x 300ml)
- Exact@, silicona de adición putty soft fast setting (2 x 300ml)
- Exact@, silicona de adición light body normal setting (2 x 50ml)
- Exact@, silicona de adición regular body normal setting (2 x 50ml)
- Exact@, silicona de adición light body fast setting (2 x 50ml)
- Exact@, silicona de adición super light body normal setting (2 x 50ml)

DESCRIPCIÓN Y/O ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Siliconas de adición para impresión dental para procedimiento de doble impresión, así como base de la técnica sándwich, galvanizables.

COMPOSICIÓN:


Polivinilsiloxanos (siliconas de segunda generación) saborizante. Catalizador.

MODO DE USO:


PREPARACIÓN Putty soft normal / fast setting

Secar las zonas a reproducir y evitar un nuevo aporte de líquidos. Dispensar las dos pastas en la proporción 1:1 con ayuda de las cucharillas dosificadoras de colores.


- (1) Mezclar bien los dos componentes hasta que se crea una masa de color uniforme.
- (2) Distribuir el material mezclado sobre la cubeta de impresión
- (3) Introducir ésta en la cavidad bucal
- (4) Coloque el material mezclado en la cubeta de impresión con una espátula ó con una jeringa en el caso de los elastómeros y llévela a la boca.

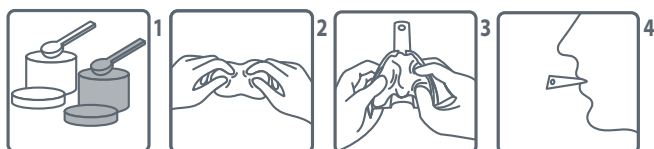

NORMAL

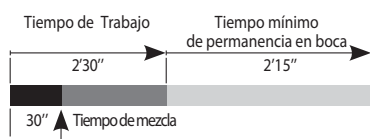

FAST

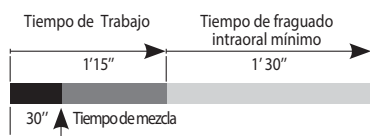

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PUTTY SOFT NORMAL	PUTTY SOFT FAST
Clasificación ISO 4823	Tipo 0	
Tiempo de mezcla	30"	
Tiempo de trabajo *	2' 30"	1' 15"
Tiempo mínimo de permanencia en boca	2' 15"	1' 30"
Capacidad de recuperación	99,9%	
Resistencia compresiva	4%	
Variación dimensional tras 24 horas	-0,02%	
Exactitud de reproducción	25µm	
Dureza Shore A	50	

* Medición realizada a 23 +/- 2°C y 50 +/- 10% de humedad relativa del aire.

PREPARACIÓN Light body normal setting/ fast setting - Regular body normal setting - Super light body normal setting


Secar las zonas a reproducir y evitar un nuevo aporte de líquidos. Introducir el cartucho en el dispensador.

- (1) Una vez retirada la tapa, dispensar una pequeña cantidad de silicona por ambas toberas accionando repetidamente la palanca.
- (2) Colocar la punta de mezcla sobre el cartucho y, en caso necesario y para asegurar una aplicación de precisión perfecta, utilizar adicionalmente el pequeño Oral Tip.
- Apretar firmemente la palanca, para aplicar Klepp Exact@ mezclado desde la punta de mezcla a la cubeta de impresión.
- (3) A continuación, introducir ésta en la cavidad bucal.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN:

Es importante controlar, que la silicona dispensada presente una coloración uniforme.

Para conservar el material sobrante en el cartucho, se deja la punta de mezcla montada sobre el cartucho hasta el próximo uso. Antes de montar una punta de mezcla nueva deberá confirmarse que la silicona sale uniformemente por las dos toberas. Cuando el cartucho no se utiliza por un período prolongado, pueden formarse obstrucciones, que deberán ser eliminadas con un instrumento puntiagudo antes de montar una punta de mezcla nueva.

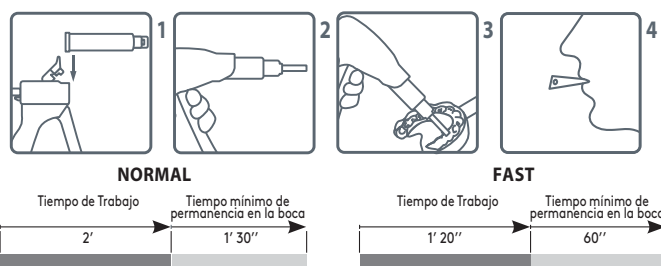

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUPERLIGHT NORMAL SET	LIGHT NORMAL SET	LIGHT FAST SET	REGULAR NORMAL SET
Clasificación ISO 4823	Tipo 3	Tipo 3	Tipo 3	Tipo 2
Tiempo de mezcla	Automezclante			
Tiempo de trabajo *	2'	2'	1'20"	2'
Tiempo mínimo de permanencia en boca	1'30"	1'30"	60"	1'30"
Capacidad de recuperación	99,9%			
Resistencia compresiva	4%	4%	4%	3%
Variación dimensional tras 24 horas	- 0,02%			
Exactitud de reproducción	5µm			
Dureza Shore A	47	47	47	50

* Medición realizada a 23 +/- 2°C y 50 +/- 10% de humedad relativa del aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente precisión
- Máxima tixotropicidad e hidrofilia
- Rápido tiempo de fraguado en boca
- Alta resistencia al desgarro
- Muy elástico
- Biocompatible
- Resistente al limpiador aséptico

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Los tiempos indicados están condicionados por:

- Cambios de temperatura del material, de la habitación y/o de las manos de la persona durante la mezcla (las temperaturas más altas acortan los tiempos indicados, las temperaturas más bajas los prolongan)
- Cambios de la velocidad y/o la fuerza durante la mezcla
- Humedad

Evitar el contacto de la silicona con diques de goma o guantes de látex o componentes de este material. El látex inhibe el endurecimiento de los polivinilsiloxanos. Lávese bien las manos. Utilice guantes de vinilo/nitrilo. No confunda las tapas de los envases y utilice la cucharilla dosificadora prevista para cada pasta.

Los envases deberán cerrarse bien después de su uso.

Después de la toma de impresión, ésta debe lavarse bajo agua corriente para eliminar los restos de saliva y de sangre y secarse cuidadosamente para asegurar una buena adherencia de la segunda impresión sobre la primera. La impresión puede guardarse sin tratamientos especiales.

La impresión podrá vaciarse como muy pronto 30 minutos después de haberla retirado de la boca.

