



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

WHITENING AMBULATORIO



NOMBRE DEL PRODUCTO:

Klepp Whitening Ambulatorio

DESCRIPCIÓN:

Gel blanqueador a base de Peróxido de Carbamida.

INDICACIONES:

- Aclaramiento de dientes.
- Piezas dentarias pigmentadas por agentes endógenos y/o exógenos.
- Como complemento a otras técnicas de blanqueamiento dental.
- Para mantenimiento de tratamientos blanqueadores.

COMPOSICIÓN:

- Peróxido de Carbamida al 11% - al 16% - al 22%
- Con Nitrato de Potasio al 0.50% y Fluoruro de Sodio al 0.25%

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1) Antes del tratamiento blanqueador debe efectuarse un diagnóstico. Debe revisarse que las encías estén saludables para minimizar el trauma hacia los tejidos. Las restauraciones con fallas y/o zonas con caries deben ser restauradas. Las superficies radiculares expuestas pueden experimentar sensibilidad.
- 2) Remueva la placa bacteriana. Retire el sarro y las manchas extrínsecas. Controlar que la encía esté sana en la zona a blanquear.
- 3) Tratar caries y posibles filtraciones. En casos de problemas de hipersensibilidad se pueden tratar previamente con Klepp Desensitizer.
- 4) Tomar una fotografía antes del tratamiento o utilizar muestrario de colores

CONFECCIÓN DE LA CUBETA:

Se debe prestar mucha atención al fabricar las cubetas, ya que no deben sobrepasar el borde gingival y llegar al tejido blando, pudiendo producir irritación del mismo.
Fabricar un modelo de la hemiarcada en forma de herradura. Sobre el modelo obtenido, se coloca una resina espaciadora fotocurable. Se realiza la cubeta en la clínica o en el laboratorio con una máquina de vacío y calor. Esta será realizada en plástico blando de 0,6 a 0,9 mm de espesor. Deberá cubrir todos los dientes de la arcada y extenderse 2 a 3 mm hacia apical del margen gingival. En la arcada superior debe dejarse libre el paladar y extenderse sobre las rugas palatinas. Los pacientes con oclusión fuerte o bruxómanos pueden necesitar una cubeta más gruesa.

PROCEDIMIENTO:

Instruir al paciente sobre las siguientes consideraciones (es importante leer estas instrucciones antes de proceder a la utilización del producto):

- Cepillar minuciosamente los dientes antes de insertar la cubeta y limpiar entre los dientes con hilo dental.
- Colocar el gel en la cubeta sólo en la cara vestibular de las piezas a blanquear, evitando colocar exceso que puede irritar las encías. Aproximadamente una gota por diente.
- Colocar la cubeta en la arcada correspondiente. Es posible que observe un "burbujeo" mientras las tiene puestas. De hecho, este burbujeo es parte del proceso blanqueador.
- Tenga mucho cuidado de que el gel no toque las encías. Quite el exceso de gel con un hisopo de algodón.
- Luego de retirar la cubeta, cepillar bien los dientes y enjuagar controlando que no quede gel en ninguna zona.
- Retirar la cubeta e higienizar la misma con un cepillo dental. Secarla y guardarla. El tiempo de contacto del gel varía según el tipo de Klepp whitening.

Klepp Whitening 11%: Retirar la cubeta después de 8-10 horas durante la noche.

Klepp Whitening 16%: Retirar la cubeta después de 4-6 horas.

Klepp Whitening 22%: Retirar la cubeta después de 2-4 horas.

Klepp Whitening Alineadores: Retirar la cubeta después de 8-10 horas durante la noche.

Respetar el tiempo de contacto indicado. No dejar la cubeta en la boca más tiempo.

Repetir el procedimiento según lo aconsejado por el odontólogo.

No beber ni ingerir alimentos con la cubeta colocada.

Durante el tratamiento y hasta una semana posterior al mismo: No ingerir

té, café o bebidas coloreadas. No ingerir alimentos que contengan sustancias pigmentantes. No utilizar lápices labiales. No fumar. Suspender el uso en caso de reacciones adversas y consultar con el profesional a la brevedad. Si se desea restaurar con composite o cerámica es aconsejable esperar de 1 a 6 semanas después del blanqueamiento, para lograr una buena fuerza de enlace y adhesión.

PRECAUCIONES:

- Evite el tratamiento si considera que el paciente puede tragar o aspirar la cubeta.
- Instruya al paciente para que cuide de no tragar el gel o los enjuagues.
- No utilizar si el envase se encontrara dañado.
- No poner en contacto de piel o mucosa, en caso que ello ocurra lavar con abundante agua.
- Si existen restauraciones en dientes anteriores estos deberán de ser sustituidos una vez finalizado el tratamiento para igualar el color.
- Si existen prótesis fijas de porcelana en dientes anteriores estas deberán de ser sustituidas una vez finalizado el tratamiento para igualar el color.
- Como precaución, Klepp Whitening NO debe utilizarse durante el embarazo.
- El producto NO es para inyectar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- No se debe blanquear si hay:
- Patologías gingivales o enfermedades periodontales.
- Hipersensibilidad dentinaria.
- Deficientes restauraciones.
- Dientes con fisuras profundas y/o Morfología dental anómala.
- Dientes con pérdida importante de esmalte y/o defectos de desarrollo del esmalte.
- Reabsorción radicular.
- Pigmentación provocada por corrosión de amalgamas (sólo saldrán quitándose con una fresa).
- Composites mal ajustados.
- Dientes con grandes restauraciones u obturaciones repetidas en el mismo diente.
- Tetraciclina grado III y fluorosis moderada y grave.

ADVERTENCIAS:

- Las coronas de porcelana, carillas y empastes blancos no se aclaran con el blanqueamiento.
- Las restauraciones deberían ser selladas adecuadamente y toda la dentina expuesta sensible debería protegerse.
- Algunos pacientes han notado una incomodidad temporal en las encías, labios, garganta o lengua. Si alguno de estos síntomas persiste más de 2 días, o si empeoran progresivamente, llame a su dentista. Usualmente, estos efectos colaterales se calman de 1-3 días después de dejar el tratamiento.
- Si el paciente tiene alergia conocida o una sensibilidad química a los peróxidos, carbopol, glicerina, NO utilice Klepp Whitening. El sabor menta puede ser irritante para algunos pacientes. Si el paciente tiene una sensibilidad conocida a la menta, utilice la presentación sin sabor.
- Algunas amalgamas viejas, o empastes "plateados" pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento. Esto es normal.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Whitening: 11% /16% /22% / 11% para Alineadores.

ALMACENAMIENTO:

Luego de su uso cerrar las jeringas bien y conservar preferentemente entre 4° y 15° C (heladera preferiblemente).



www.klepp.com.ar

info@klepp.com.ar