



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

AGUJAS DENTALES



DESCRIPCIÓN:

Agujas para uso odontológico con cono roscado para jeringas de cartucho, estériles, con triple bisel, baño de silicona e indicador de bisel. Desechables, atóxicas, y apirógenas si se encuentran en envase cerrado.

El punto de sellado que une el capuchón al protector garantiza el mantenimiento de la esterilidad de la aguja.

Administración de anestesia y otras soluciones, en odontología.

INSTRUCCIONES DE USO:

Colocación de la aguja en la jeringa.

- 1) Rompa el sello
- 2) Tire mientras gira para quitar el capuchón
- 3) Enrosque la base en la jeringa, teniendo cuidado de no quitar el protector.
- 4) Retire el protector de un ligero movimiento giratorio justo antes de realizar la anestesia.

DESPUÉS DEL USO:

- 1) Desenganche la aguja de la jeringa con mucho cuidado para evitar pinchazos accidentales.
- 2) Deseche inmediatamente la aguja usada en un contenedor especial conforme a la ley, sin doblarla, romperla o manipularla de ninguna manera.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No utilizar si el sellado de garantía no está intacto.

No reutilizar. Si la aguja se reutiliza por error, existe el riesgo de contaminación, por infección cruzada.

No volver a colocar manualmente el protector en la aguja, ya que esto podría causar pinchazos accidentales.

No doble la aguja ni ejerza demasiada presión sobre ella, para evitar lesiones potencialmente graves al paciente o a usted mismo.

Conservar en el embalaje original hasta su uso. Mantener a temperatura ambiente y proteger de la humedad.

Solo para uso profesional en el campo dental.

ALMACENAMIENTO:

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la humedad.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar