



BOND DE



DESCRIPCIÓN:

Klepp Bond DE es un adhesivo fotopolimerizable con Fluor y carga, monocomponente indicado para su uso en esmalte y dentina. Compatible con todos los materiales restauradores dentales: acondicionadores, resinas fotopolimerizables, componentes restauradores y cementos de resina de tipo dual.

INDICACIONES:

Bond DE es indicado para:

- La adhesión de restauraciones directas de composites, cerómeros y compuestos fotopolimerizables.
- Cementación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámicas, cerómeros y composites, tipo: carillas, incrustaciones, onlays y coronas.

COMPOSICIÓN: Dimetacrilato de uretano, dimetacrilato de pirometílico (PMDM), metacrilato de glicidilo de bisfenol A, anhidro, dimetacrilato de 1,3-glicerol, óxido de fosfina 2,4,6-trimetilbenzoidifenil, canforquinona, hidroxitolueno butilado, dióxido de silicio, bis (hidroxietil) aminopropil N-hidroxietil octadecilamina dihidrofluoruro.

PRESENTACIÓN:

- 1 frasco de Bond DE de 5ml.
- 1 instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

Restauraciones directas

1. Aislar absolutamente la pieza dental.
2. Limpiar la superficie del esmalte utilizando pasta profiláctica (sin fluor y aromatizantes) o piedra pómez más agua.
3. Realizar el grabado ácido total de la superficie dentaria con ácido fosfórico 35-37%. Recordar que el ácido fosfórico debe estar al menos por 15 segundos en contacto con esmalte y máximo 10 segundos en contacto con dentina.
4. Lavar la superficie dental grabada con spray de agua libre de aceites esenciales que pueden contaminar la superficie. Eliminar el exceso de humedad, evitando la deshidratación de la dentina.
5. Aplicar una cantidad suficiente de adhesivo sobre la región a ser restaurada y frotar por al menos 10 segundos.
6. Evaporar el solvente y distribuir de forma homogénea al largo de toda la superficie con un chorro de aire o pincel delgado.
7. Fotopolimerizar por 20 segundos.
8. La superficie debe verse brillante, en caso contrario repetir la aplicación.
9. Garantizar la cobertura completa de las superficies preparadas.
10. En seguida aplicar al composite en capas oblicuas de 2-3mm.
11. Fotocurar cada capa de composite por 20 a 30 segundos, según las indicaciones del fabricante.
12. Terminar y pulir la restauración.

Restauraciones indirectas

1. Realizar el aislamiento correspondiente
2. Preparar las superficies de las restauraciones de cerámica, de cerómero o de composite, de acuerdo con las instrucciones de uso del producto. Las restauraciones deben ser preparadas realizándose el ataque ácido de las superficies según el material utilizado y la técnica requerida.
3. Aplicar Bond DE sobre la superficie de la restauración y, con un leve chorro de aire disperse el material y elimine los excesos del mismo, hasta conseguir una capa delgada.
4. En esta etapa, no fotopolimerizar el adhesivo, protegiéndolo de la luz.
5. Realizar el grabado ácido total de la superficie dentaria con ácido fosfórico 35-37%. Recordar que el ácido fosfórico debe estar al menos por 15 segundos en contacto con esmalte y máximo 10 segundos en contacto con dentina.
6. Remover el ácido fosfórico con abundante spray de agua.
7. Retirar el exceso de humedad con aire evitando la deshidratación de la dentina, puesto que las superficies de la dentina deben permanecer ligeramente húmedas.
8. Aplicar el adhesivo sobre el esmalte y la dentina, pincelando el material de modo suave masajeando por aproximadamente 10 segundos y en seguida aplicar un chorro de aire para dispersar el material, evaporar el solvente y eliminar excesos.
9. Evitar capas muy finas, causadas por el uso exagerado del chorro de aire.
10. Fotopolimerizar el adhesivo durante 20 segundos.
11. La superficie debe exhibir apariencia lustrosa y brillante. En caso contrario, repetir la aplicación. Garantizar la cobertura completa de las superficies preparadas.
12. Realizar el cementado de la restauración, con el medio cementante elegido.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

No utilizar en pacientes que tengan antecedentes de alergia a los componentes del producto.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Cierre el envase inmediatamente después de su uso. No almacene junto a materiales que contengan eugenol o aceite de clavo, que pueden inhibir la polimerización. Evite la exposición del producto al calor y la luz solar, u otras fuentes de luz directa. Descarte el producto conforme legislación local.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en su embalaje original y cerrado después de su uso. No almacene junto a materiales que contengan eugenol o aceite de clavo, que pueden inhibir la polimerización. Almacene, transporte y manipule Bond DE en un lugar seco y protegido de la luz solar directa y el calor, entre los 15°C y 30°C.

Vencimiento: En condiciones de almacenamiento adecuadas, tienen una vida útil de 36 meses. No usar después de la fecha de vencimiento.



www.klepp.com.ar

info@klepp.com.ar