



DIAMOND POLISH PASTE



ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en su embalaje original y cerrado después de su uso. Almacene, transporte y almacene la temperatura de 5°C a 30°C, en un lugar seco protegido de la luz solar directa y del calor.

PERIODO DE VIDA UTIL:

La fecha de caducidad en el embalaje representa el período máximo para el uso del producto.

En condiciones de almacenamiento adecuadas, la Diamond Polish Paste tiene una vida útil de 24 meses. No usar después de la fecha de vencimiento.

DESCRIPCIÓN:

Klepp Diamond Polish Paste se produce con diamante micronizado de grano extrafino (2 a 4 micras). El producto ofrece excelentes resultados en el pulido y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas, compuestos y otros materiales restauradores. Es una pasta de pulido universal.

INDICACIONES DE USO:

Diamond Polish Paste está indicada para ser utilizada en conjunto con discos de fieltro o discos aterciopelados, lo que potencia su acción en el pulido y acabado en superficies de materiales restauradores en general.

COMPOSICIÓN:

Carbómero, glicerina, hidróxido de sodio, polvo de diamante, agua desionizada y fluoruro de sodio.

INSTRUCCIONES DE USO:

Esta pasta de pulir debe usarse con discos de fieltro o discos de terciopelo en pluma de baja rotación y contra-ángulo.

- Adapte con cuidado el disco al contra-ángulo, verificando que esté bien fijado.
- Dosifique una cantidad del producto sobre el diente de manera que esa cantidad cubra la zona de restauración.
- Luego, con el contra-ángulo montado, pula la restauración, realizando movimientos intermitentes sobre el elemento dentario para evitar el calentamiento del área.
- Después de completar el pulido, simplemente enjuague el diente con agua para eliminar la pasta.

CONTRAINDICACIONES:

No hay contraindicaciones cuando la Diamond Polish Paste es utilizada por un profesional dental de acuerdo con las instrucciones de uso. Sin embargo, en pacientes que tengan antecedentes de alergia a alguno de los componentes o cuando no se pueda utilizar la técnica estipulada, recomendamos no utilizarla.

PRECAUCIONES:

Siempre use fieltros nuevos para realizar un pulido. Usar el mismo disco de fieltro con abrasivos de otras pastas puede comprometer el éxito del pulido. Use baja rotación con movimientos intermitentes, con baja presión de aplicar el fieltro sobre el diente. Esto evita el calentamiento excesivo de la superficie.

No congele el producto.



 www.klepp.com.ar

 info@klepp.com.ar